



Une entreprise mondiale leader de l'hygiène et la santé

DONT LA VISION EST :

« Engagée à améliorer le bien-être en proposant des solutions essentielles d'hygiène et de santé »

L'expérience et l'expertise de TENA

- **60 ans** d'expérience et présent dans **100+ pays**, partenaire de **30,000+** maisons de soins dans le monde entier.
- **Leader mondial du marché** et toujours en progrès dans les connaissances en matière d'incontinence, mictions et produits absorbent
- **Développement de produits et de services axés sur les connaissances** pour résoudre les problèmes dans le parcours de soins en collaboration avec des infirmières, des gériatres et des scientifiques dans les soins aux personnes âgées, l'incontinence et la dermatologie
- Concentré sur les **résultats** et l'apport de **valeur** aux résidents, aux soignants, aux maisons de soins infirmiers et à la société
- Engagé à prendre soin des **gens** et de la **planète**
- 85% des produits utilisés dans les établissements du réseau de la santé au Québec sont fabriqués à notre usine de Drummondville.





**Formation virtuelle
Choix de produits TENA**



Ordre du jour

Accueil

Anatomie d'un produit

Algorithmes de choix des produits

Évaluations TENA auprès des résidents

Ajustement

Ressources utiles

Questions

Meilleures pratiques de soins pour l'incontinence

Rendement équilibré TENA



Beaucoup de facteurs peuvent contribuer au bon rendement d'un produit.
Atteindre l'équilibre adéquat est un élément clé.



Les produits absorbants TENA ProSkin^{MC}


- **Les bonnes pratiques sont :**
 - **Prise de mesure de la clientèle** : permet d'identifier la bonne grandeur selon le produit.
 - **Bonne grandeur** : permet un ajustement près du corps, augmente la rapidité d'absorption.
 - **Bon ajustement** : permet de diminuer le risque de fuite et la rapidité d'absorption.
 - **Bon produit** : permet de diminuer le taux de change et augmente le confort du client.
 - **Bonne fréquence** : permet d'augmenter le confort du client et bonne gestion de l'inventaire.
 - **Bonne hygiène périnéale** : permet d'avoir une peau sec, une peau propre et une peau protéger.
 - **Bonne gestion de l'inventaire** : permet de faire un suivi et de contrôler.

ConfioAir® 100% breathable
respirant
transpirable



Détermination de la grandeur des culottes TENA ProSkin Stretch^M

Pour déterminer la grandeur des culottes avec précision, mesurez le tour de taille ou de hanches du résident (la plus grande mesure des deux) et consultez le tableau ci-dessous. La grandeur de la culotte est imprimée le long de l'indicateur d'humidité.

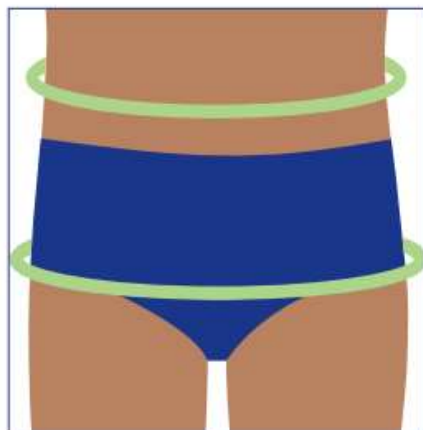

Grandeurs

PROSKIN STRETCH^{MC} ULTRA
Moyenne/Régulière (lavande)
Grande/Très grande (beige)
TT grande (blanche)

PROSKIN STRETCHTM SUPER
Moyenne/Régulière (verte)
Grande/Très grande (verte)
Bariatrique TTTG (verte)

Tour de taille/de hanches

84 - 132 cm / 33 - 52 po
104 - 163 cm / 41 - 64 po
163 - 178 cm / 64 - 70 po

84 - 132 cm / 33 - 52 po
104 - 163 cm / 41 - 64 po
175 - 244 cm / 69 - 96 po

Vous constaterez généralement que les femmes ont un tour de hanches supérieur tandis que les hommes ont un tour de taille supérieur.

Des questions? Contactez-nous :
1.800.510.8023 | www.tenaprofessionals.ca



TENA est une marque déposée de Essity, Produits de santé et d'hygiène, AB. TENA ProSkin Stretch est une marque de commerce de Essity, Produits de santé et d'hygiène, AB.
©Essity, Produits de santé et d'hygiène, AB, 2021 129367F J21 - .5M





TENA®


Continuum de produits TENA

Assortiment varié pour des besoins personnalisés



Coussinet TENA Léger

Polymères superabsorbants aident à emprisonner le liquide rapidement pour une protection fiable

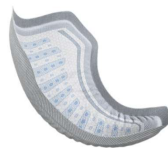

TENA Men Protection conçue spécialement pour homme



Culotte protectrice TENA Sécurité et confort en option unisexe ou adaptée au sexe



Coussinets TENA Conçus pour être doux pour la peau tout en offrant un ajustement confortable



TENA Flex Concept innovateur avec ceinture pour appuyer la santé cutanée, le confort de l'utilisateur et la sécurité contre les fuites



TENA Stretch Produit tout-en-un de haut niveau de sécurité contre les fuites, qui appuie la santé cutanée



essity

Les vêtements enfilables

ConfioAir® 100 % Perméable à l'air



Culotte protectrice TENA ProSkin^{mc} Plus



72631

64 -89 cm (25-35 po)



72632

86 -112 cm (34-44 po)



72633

114 -147 cm (45-58 po)



72634

140 -168 cm (55-66 po)



72508

173 -203 cm (68-80 po)

Culotte protectrice TENA ProSkin^{mc} Extra



72116

64 -89 cm (25-35 po)



72232

86 -112 cm (34-44 po)



72332

114 -147 cm (45-58 po)



72425

140 -168 cm (55-66 po)



72518

173 -203 cm (68-80 po)

Les vêtements enfilables Plus Absorbants

Culotte protectrice
TENA ProSkin^{MC}
Super de Nuit

ConfioAir[®] 100 % Perméable à l'air



35% plus
absorbante que
TENA ProSkin^{MC} Extra



72235
86 -112 cm (34-44 po)



72325
114 -147 cm (45-58 po)



72427
140 -168 cm (55-66 po)

Les vêtements enfilables selon le sexe



Sous-vêtement Femme

Sous-vêtement Homme

Sous-vêtement Femme

Sous-vêtement Homme

N° d'article	Taille/hanches
73020	86-112 cm (34-44 po)
73030	114-147 cm (45-58 po)
73040	140-168 cm (55-66 po)

N° d'article	Taille/hanches
73520	86-112 cm (34-44 po)
73530	114-147 cm (45-58 po)
73540	140-168 cm (55-66 po)

N° d'article	Taille/hanches
54285	74-102 cm (29-40 po)
54286	94-127 cm (37-50 po)
54287	122-163 cm (48-64 po)

N° d'article	Taille/hanches
81780	86-127 cm (34-50 po)
81920	112-163 cm (44-64 po)

Sous-vêtement TENA ProSkin^{mc}

Sous-vêtement TENA absorption super plus



TENA®

Culotte protectrice TENA ProSkin^{MC}

Guide d'ajustement



Enfiler comme un
sous-vêtement régulier.



Déchirer les côtés pour
un retrait facile.



Produit	Absorption	N° de commande	Tour de hanches	Couleur	Qté/ caisse	Format
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Super de nuit : M		72235	86-112 cm (34-44 po)	Blanc	56	4/14
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Super de nuit : G	●●●●●●●●	72325	114-147 cm (45-58 po)	Blanc	56	4/14
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Super de nuit : TG		72427	140-168 cm (55-66 po)	Blanc	48	4/12

Produit	Absorption	N° de commande	Tour de hanches	Couleur	Qté/ caisse	Format
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Extra : P		72116	64-89 cm (25-35 po)	Blanc	64	4/16
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Extra : M		72232	86-112 cm (34-44 po)	Blanc	64	4/16
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Extra : G	●●●●●●○○	72332	114-147 cm (45-58 po)	Blanc	64	4/16
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Extra : TG		72425	140-168 cm (55-66 po)	Blanc	48	4/12
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Extra : TTG		72518	173-203 cm (68-80 po)	Blanc	48	4/12

Produit	Absorption	N° de commande	Tour de hanches	Couleur	Qté/ caisse	Format
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Plus : P*		72631	64-86 cm (25-34 po)	Blanc	60	4/15
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Plus : M		72632	86-112 cm (34-44 po)	Blanc	80	4/20
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Plus : G	●●●●●●○○	72633	114-147 cm (45-58 po)	Blanc	72	4/18
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Plus : TG		72634	140-168 cm (55-66 po)	Blanc	56	4/14
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} Plus : TTG*		72508	173-203 cm (68-80 po)	Blanc	48	4/12

Produit	Absorption	N° de commande	Tour de hanches	Couleur	Qté/ caisse	Format
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} pour femmes : P/M		73020	86-112 cm (34-44 po)	Beige	80	4/20
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} pour femmes : G	●●●●●●○○	73030	114-147 cm (45-58 po)	Beige	72	4/18
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} pour femmes : TG		73040	140-168 cm (55-66 po)	Beige	56	4/14

Produit	Absorption	N° de commande	Tour de hanches	Couleur	Qté/ caisse	Format
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} pour hommes : M		73520	86-112 cm (34-44 po)	Gris	80	4/20
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} pour hommes : G	●●●●●●○○	73530	114-147 cm (45-58 po)	Gris	72	4/18
Culotte protectrice TENA ProSkin ^{MC} pour hommes : TG		73540	140-168 cm (55-66 po)	Gris	56	4/14

Voici la technologie respirante TENA® ConfioAir®



- La nouvelle technologie respirante TENA® ConfioAir® a été ajoutée à bon nombre de nos produits TENA® pour les rendre encore plus conviviaux pour la peau.
- La nouvelle technologie respirante TENA® ConfioAir® aide à maintenir l'équilibre d'humidité naturelle de la peau pour la garder confortable et au sec.
- Les produits dotés de la technologie respirante TENA® ConfioAir® sont respirants à 100 %!



67802

84 -132cm (33-52 po)



67803

104 -163cm (41-64 po)



67902

84 -132cm (33-52 po)



61390

163 -178cm (64-70 po)



61391

175 -244cm (69-96 po)

67903

104 -163cm (41-64 po)



Culottes ajustables extensibles TENA ProSkin Stretch^{MC} Ultra



ConfioAir[®] 100% breathable
respirant
transpirable



TENA ProSkin^{MC} : Triple protection pour maintien au sec, douceur et sécurité antifuite.

Technologie entièrement respirante qui aide à maintenir l'équilibre d'hydratation naturelle de la peau.

•Côtés extensibles qui permettent un ajustement confortable qui reste bien en place.

InstaDri Skin-Caring System[®] : Zone d'absorption ciblée bleue qui évacue rapidement l'humidité.



Pour les personnes semi-mobiles et immobiles



Essity Internal

Culottes ajustables extensibles TENA ProSkin Stretch^{MC} Ultra



ConfioAir® 100% breathable
respirant
transpirable



Le choix du vêtement doit-être fait en fonction des mensurations du client.
Prendre une première mesure au plus fort des hanches, une deuxième mesure du tour de la taille sous le nombril.
Avec la plus grande des deux mesures faire le choix du vêtement approprié pour le client.

Pour les personnes semi-mobiles et immobiles



Essity Internal



Culottes ajustables extensibles

TENA ProSkin^{MC} Super



ConfioAir[®] 100% breathable
respirant
transpirable




TENA ProSkin^{MC} : Triple protection pour maintien au sec, douceur et sécurité antifuite.

Technologie entièrement **respirante** qui aide à maintenir l'équilibre d'hydratation naturelle de la peau.

• **Côtés extensibles** qui permettent un ajustement confortable qui reste bien en place.

InstaDri Skin-Caring System[®] : Zone d'absorption ciblée bleue qui évacue rapidement l'humidité.

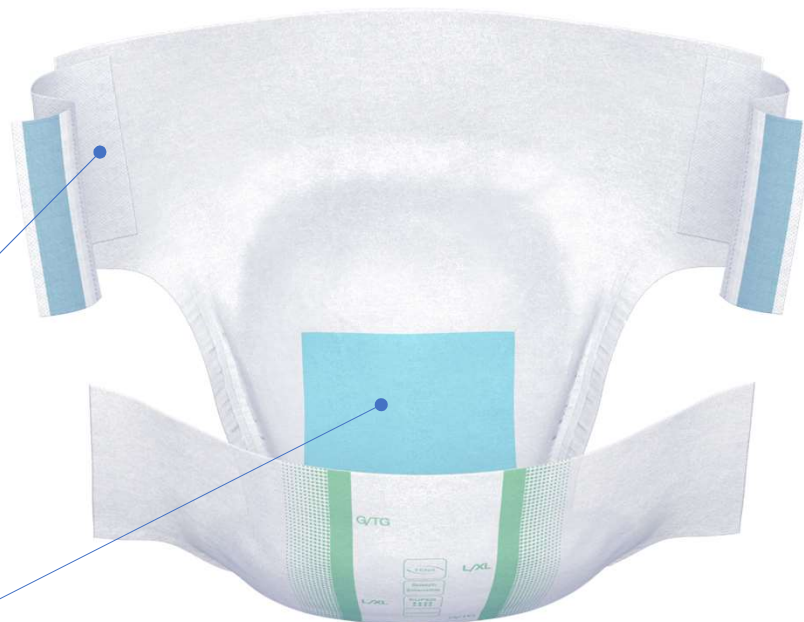

Pour les personnes semi-mobiles et immobiles



Essity Internal

The TENA logo is positioned at the top right of the page. It features the word "TENA" in a bold, blue, sans-serif font, centered within a white oval. This oval is set against a blue background that has a curved, wave-like shape at the bottom, with a green and yellow gradient on the left side.

Choses importantes à FAIRE et NE PAS FAIRE

Application de la culotte Stretch TENA

À faire

- Effectuer les soins périnéaux lors de chaque application de produit.
- Sélectionner un produit de la bonne grandeur en accord avec le profil du client. Prendre les mesures du client.
- Ajuster de près, sans trop serrer les micro-crampons, ce qui permettra à la culotte de s'ajuster avec les mouvements du corps. Ajuster comme un sous-vêtement, avec les ouvertures prévues bien placées à l'aîne, et non contre le haut de la cuisse.

À ne pas faire

- Ne pas utiliser plus d'un produit à la fois. Ne pas placer un autre produit à l'intérieur d'une culotte. Le doublage de produits est inconfortable et irrite la peau.
- Ne pas utiliser de poudre pour bébé, de fécule de maïs ou de crème barrière qui risque de nuire à l'absorption d'urine. Utilisez une crème sur ordonnance selon les directives prescrites.
- Ne pas assumer que « plus c'est grand, mieux c'est ». **Plus grand n'est pas plus absorbant.**




TENA®

Changement et retrait de culotte TENA

Changement approprié

Nous recommandons d'appliquer vos compétences d'évaluation pour déterminer quand changer le produit.

L'indicateur d'humidité est un outil qui sert d'aide visuelle.

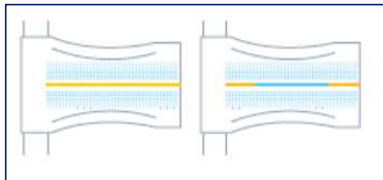

1. Lavez-vous les mains et enfiler des gants.
2. Roulez la personne sur le côté ou placez-la en position debout.
3. Dégrafez les attaches et tirez doucement sur la culotte à partir de l'arrière. Enroulez-la sur le revêtement à l'épreuve de l'humidité et jetez-la.
4. Effectuez des soins périnéaux.
5. Appliquez une culotte TENA propre, en suivant la section Application.

Remarque : En présence de selles, le produit doit être changé immédiatement

Retrait approprié du produit absorbant et mise au rebut

- Lorsque vous retirez un produit, toujours l'enrouler sur lui-même pour empêcher les odeurs d'ammoniac de s'échapper.
- Utilisez les attaches du produit pour le garder enroulé, avec la doublure à l'intérieur.
- Toujours placer un produit souillé dans un contenant prévu à cet effet, doté d'un couvercle hermétique .
- Évitez de jeter un produit souillé sur le plancher pour des raisons de contrôle de l'infection.



essity




TENA®


Application de la culotte TENA Stretch^{MC}

Petit truc
Fin de l'indicateur
d'humidité aligné avec le
coccyx


Application de la culotte TENA Stretch^{MC} à une personne couchée

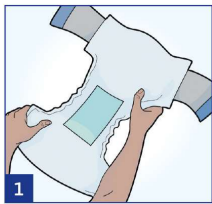


1 Déplier le produit pour qu'il soit prêt à être appliqué.

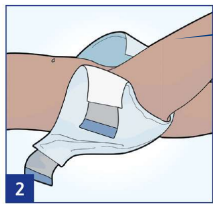


2 Positionner la personne sur le côté et placer la culotte entre ses jambes de l'avant vers l'arrière.

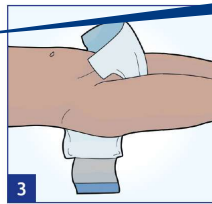

3 Faire rouler la personne sur le dos et lisser l'avant de la culotte de manière à ce qu'elle soit bien alignée avec les côtés.

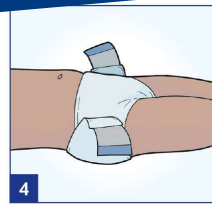


4 Replier les côtés vers l'extérieur pour en dégager les attaches et les fixer ensuite sur le revêtement extérieur semblable au tissu.

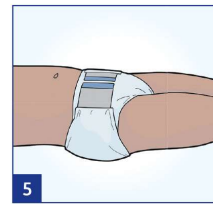

5 Tirer doucement sur les attaches pour bien ancrer les microcrampons dans le revêtement et réajuster au besoin.

Application de la culotte TENA Stretch^{MC} à une personne debout

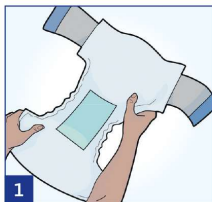

1 Déplier le produit pour qu'il soit prêt à être appliqué.



2 Placer la culotte entre les jambes de la personne debout, de l'avant vers l'arrière.



3 Lisser l'avant de la culotte de manière à ce qu'elle soit bien alignée avec les côtés.



4 Replier les côtés vers l'extérieur pour en dégager les attaches et les fixer ensuite sur le revêtement extérieur semblable au tissu.



5 Tirer doucement sur les attaches pour bien ancrer les microcrampons dans le revêtement et réajuster au besoin.

Étendez le panneau de chaque côté sans tirer sur les élastiques

Conseils

- Les culottes TENA Stretch^{MC} peuvent être changées en défaisant les attaches ou elles peuvent être enfilées et retirées comme une culotte protectrice pour favoriser les soins de rééducation.
- Assurer l'intimité de la personne et ne dévêtir que les parties du corps qui sont nécessaires au changement de produit absorbant.
- L'efficacité des attaches à microcrampons larges TENA® Sure Stay n'est pas compromise par l'utilisation de lotions, de crèmes ou de gants avec talc.

- La culotte doit être changée en présence de selles.
- Ajuster la culotte dans les plis naturels de l'aîne et passer ensuite le doigt le long des fronces élastiques pour s'assurer qu'elles sont bien déployées et qu'aucune partie du revêtement interne n'est retournée vers l'extérieur.
- Enrouler la culotte souillée sur elle-même et la sceller à l'aide des attaches pour la mettre au rebut.

Ne pas secouer la culotte

Conseils Tena

CONSEILS TENA® : Doublage de Produits

LE SAVIEZ-VOUS? Le doublage de produits, une pratique qui consiste à insérer un coussinet d'appoint ou léger à l'intérieur du produit absorbant d'un patient ou d'un résident, peut faire augmenter inutilement le risque d'inconfort et d'irritation cutanée.

RISQUES DU DOUBLAGE DE PRODUITS

Humidité contre la peau : Si la quantité d'urine émise dépasse la capacité du produit intérieur, l'humidité n'est alors plus emprisonnée loin de la peau. Le revêtement étanche du produit d'appoint peut empêcher l'absorption d'urine dans le centre absorbant du produit absorbant externe. L'abondance d'urine crée des fuites le long de la jambe et garde l'humidité contre la peau. Le produit d'appoint nuit aussi au fonctionnement de l'indicateur d'humidité du produit absorbant externe, avec comme conséquence qu'aucun changement de couleur n'indiquera que le produit a été souillé et doit être vérifié.

Plaies de lit : Le volume créé par la superposition de produits cause des pressions et des frictions contre la peau et les tissus sous-jacents. L'humidité emprisonnée dans les diverses couches de produits entraîne une surhydratation et une macération de la peau. Les deux constituent des facteurs de risque de lésion cutanée.

Infections des voies urinaires (IVU) : L'humidité emprisonnée dans les couches multiples de produits n'est pas absorbée adéquatement et peut mener à la croissance bactérienne et aux infections.

Fuites et odeurs : Comme un coussinet d'appoint empêche l'absorption dans la culotte, dont le centre a été spécialement conçu à cette fin, il en résulte des fuites qui créent une odeur perceptible.

Friction et irritation cutanée sont souvent le résultat du volume accru créé entre les jambes par le doublage de produits.

Le produit peut devenir visible pour les autres personnes, ce qui porte atteinte à la dignité de la personne.

Et si un patient/résident demande que son produit soit doublé ?

Souvent, l'incontinence crée un sentiment d'insécurité chez les patients/résidents particulièrement en ce qui a trait aux fuites et aux odeurs. Ils peuvent penser que doubler le produit leur offrira une protection accrue, mais en réalité, l'utilisation d'un produit de meilleure qualité permet de gérer les soins de manière plus efficace au coût et en offrant un plus grand niveau de confort que si deux produits ou plus sont superposés. Il devient important de fournir aux patients ou résidents, ainsi qu'à leurs familles, une formation à cet égard.



TENA®










CONSEIL TENA® :
Il n'est jamais nécessaire de doubler un produit absorbant pour obtenir une protection adéquate. Il existe des produits absorbants mieux profilés et ajustés dans toute une gamme de styles, de grandeurs et de niveaux d'absorption qui conviennent aux besoins de chaque personne en matière de confort, de dignité et de sécurité contre les fuites.

Lorsque vient le moment de choisir un produit absorbant pour un patient ou résident, les facteurs suivants devraient être considérés :

- Cognition
- Niveau de mobilité
- Capacité de transfert
- Gravité de l'incontinence
- Sexe de la personne
- Ajustement
- Facilité d'utilisation
- Produit doit emprisonner l'urine loin de la peau
- Protection pour les vêtements
- Préservation de la dignité et du confort de la personne
- Promotion de l'indépendance de la personne













essity



Code fournisseur	Description du produit	Dimension	Format	Image
54344	Tena Ultra mince légère	25 cm (10 po)	6 sacs/24 unités	
54284	Tena intermédiaire	28 cm (11 po)	6 sacs/20 unités	
54427	Tena Ultime longueur	41 cm (16 po)	4 sacs/10 unités	
50600	Tena pour Homme	n/a	6 sacs/20 unités	
62321	Tena Confort Extra	40 cm (15.5 po)	3 sacs/30 unités	
36044	Culottes Tena Confort (culotte Filet) P/M	51-94 cm (20-37 po)	12 sacs/2 unités	
36055	Culottes Tena Confort (culotte Filet) L/XL	71-132 cm (28-52 po)	12 sacs/2 unités	
36066	Culottes Tena Confort (culotte Filet) XXL/XXXL	97-157 cm (38-62 po)	12 sacs/2 unités	
64211	Culottes Tena Confort (culotte Filet) P/M	51-94 cm (20-37 po)	Vrac 60 unités	
64222	Culottes Tena Confort (culotte Filet) L/XL	71-132 cm (28-52 po)	Vrac 60 unités	
64233	Culottes Tena Confort (culotte Filet) XXL/XXXL	97-157 cm (38-62 po)	Vrac 60 unités	
64244	Culottes Tena Confort (culotte Filet) Bariatrique	122-183 cm (48-72 po)	Vrac 25 unités	
72631	Culotte Tena Proskin pour femmes P/M	86-112 cm (34-44 po)	4 sacs/20 unités	
72632	Culotte Tena Proskin pour femmes G	114-147 cm (45-58 po)	4 sacs/18 unités	
72633	Culotte Tena Proskin pour femmes TG	140-168 cm (55-66 po)	4 sacs/14 unités	
72634	Culotte Tena Proskin pour Hommes M	86-112 cm (34-44 po)	4 sacs/20 unités	
72508	Culotte Tena Proskin pour Hommes G	114-147 cm (45-58 po)	4 sacs/18 unités	
72116	Culotte Tena Proskin pour Hommes TG	140-168 cm (55-66 po)	4 sacs/14 unités	
72232	Tena Culotte protectrice Plus Petite	64-89 cm (25-35 po)	4 sacs/15 unités	
72332	Tena Culotte protectrice Plus Moyenne	86-112 cm (34-44 po)	4 sacs/20 unités	
72425	Tena Culotte protectrice Plus Large	114-147 cm (45-58 po)	4 sacs/18 unités	
72518	Tena Culotte protectrice Plus X-Large	140-168 cm (55-66 po)	4 sacs/14 unités	
72235	Tena Culotte protectrice Plus XX-Large	173-203 cm (68-80 po)	4 sacs/12 unités	
72325	Culotte Tena Femme Super Plus P/M	74-102 cm (29-40 po)	4 sacs/18 unités	
72427	Culotte Tena Femme Super Plus Large	94-127 cm (37-50 po)	4 sacs/16 unités	
73020	Culotte Tena Femme Super Plus X-Large	122-163 cm (48-64 po)	4 sacs/14 unités	
73030	Culotte protectrice Tena Homme M/L	86-127 cm (34-50 po)	4 sacs/16 unités	
73040	Culotte protectrice Tena Homme X-Large	112-163 cm (44-64 po)	4 sacs/14 unités	

Votre choix de produit sur le site d'acquisition



73520	Tena Culotte protectrice Extra Petite	64-89 cm (25-35 po)	4 sacs/16 unités	
73530	Tena Culotte protectrice Extra Moyenne	86-112 cm (34-44 po)	4 sacs/16 unités	
73540	Tena Culotte protectrice Extra Large	114-147 cm (45-58 po)	4 sacs/16 unités	
54285	Tena Culotte protectrice Extra X-Large	140-168 cm (55-66 po)	4 sacs/12 unités	
54286	Tena Culotte protectrice Extra XX-Large	173-203 cm (68-80 po)	4 sacs/12 unités	
54287	Tena Culotte protectrice Super de nuit Moyenne	86-112 cm (34-44 po)	4 sacs/14 unités	
81780	Tena Culotte protectrice Super de nuit Large	114-147 cm (45-58 po)	4 sacs/14 unités	
81920	Tena Culotte protectrice Super de nuit X-Large	140-168 cm (55-66 po)	4 sacs/12 unités	
67802	Culotte Stretch Ultra M/R (Lavande)	84-132 cm (33-52 po)	2 sacs/36 unités	
67803	Culotte Stretch Ultra L/XL (Beige)	104-163 cm (41-64 po)	2 sacs/36 unités	
61390	Culotte Stretch Ultra 2X-Large (gris)	163-178 cm (64-70 po)	2 sacs/32 unités	
67902	Culotte Stretch Super M/R (Verte)	84-132 cm (33-52 po)	2 sacs/28 unités	
67903	Culotte Stretch Super L/XL (Verte)	104-163 cm (41-64 po)	2 sacs/28 unités	
61391	Culotte Stretch Super 3X-Large Bariatrique (vert)	175-244 cm (69-96 po)	4 sacs/8 unités	
66100	Culotte Tena Petite (verte)	56-91 cm (22-36 po)	8 sacs/12 unités	
710824	Culotte Tena Slip Petite	52-86 cm (21-34 po)	3 sacs/24 unités	
62418	Tena Régulier de jour (bleu)	61 cm (24 po)	2 sacs/46 unités	
62618	Tena Plus de jour (jaune)	61 cm (24 po)	2 sacs/40 unités	
62718	Tena Super de Nuit (vert)	69 cm (27 po)	2 sacs/24 unités	
67804	Culotte Flex Super 8 - Petite (pêche)	61-87 cm (24-34 po)	3 sacs/30 unités	
67805	Culotte Flex Super 12 - Moyenne (vert)	71-107 cm (28-42 po)	3 sacs/30 unités	
67806	Culotte Flex Super 16 - Large (jaune)	84-127 cm (33-50 po)	3 sacs/30 unités	
67807	Culotte Flex Super 20 - X-Large (gris)	104-155 cm (41-61 po)	3 sacs/30 unités	
67837	Culotte Flex Maxi 12 - Moyenne (vert)	71-107 cm (28-42 po)	3 sacs/22 unités	
67838	Culotte Flex Maxi 16 - Large (jaune)	84-127 cm (33-50 po)	3 sacs/22 unités	



La suite des produits





Marc Alexandre
Gestionnaire de comptes
Région de Québec
Téléphone: 418-956-1143
Courriel: marc.alexandre@essity.com

